



INSTRUMENTEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL

Blanisol®-Pur

Hochkonzentrierter Spezialreiniger
für med. Instrumente (auch Endoskope)
Reinigungsverstärker für kationaktive Desinfektionsmittel
Sparsamer, pflegender Flächenreiniger

Détergent spécial très concentré pour les instruments
médicaux (y compris les endoscopes)
Renforce l'action détergente des
désinfectants cationactifs
Détergent de surfaces économique,
non agressif pour les surfaces



CE

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Blanisol®-Pur

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:
15–30 g nichtionische Tenside = Isotridecanol ethoxyliert,
1 g Alkyldimethylbenzylammoniumchloride, Duftstoffe

ANWENDUNGSGEBIETE

- Instrumenten- und Flächenreiniger
- Reinigungsverstärker für kationische Desinfektionsmittel

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Verdünnt anwenden!

Blanisol®-Pur ist ein flüssiges Konzentrat, mit dem jede gewünschte Gebrauchsverdünnung durch Zugabe von Wasser hergestellt werden kann. Zur Vermeidung von Schaumbildung immer zuerst Wasser einfüllen und dann **Blanisol®-Pur** dazugeben.

- | | |
|--|----------------|
| • Reinigung medizinischer Instrumente | 0,25 % – 1,0 % |
| • Reinigung wasserbeständiger Flächen | 0,25 % – 0,5 % |
| • Reinigungsverstärkung kationischer Desinfektionsmittel | 0,25 % – 0,5 % |

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Reinigungsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!

EIGENSCHAFTEN

Blanisol®-Pur ist ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die materialschonende Beseitigung auch starker organischer Verschmutzungen, insbesondere Blut, Eiweiß und Fett.

Die chemisch/mikrobiologische Verträglichkeit mit den Desinfektionsmitteln **Almyrol®**, **Lysoformin® spezial**, **Lysoformin® 3000** und **Lysoformin® rapid** wird zugesichert.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1 Liter-Flasche

Art.-Nr.

2113

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Blanisol®-Pur

Pour usage professionnel

COMPOSITION

100 g de Blanisol®-Pur contiennent:
15–30 g de tensides non-ioniques = Isotridecanol ethoxyliert,
1 g d'ammonium chloride d'alkyl de diméthyl benzyl, parfums

DOMAINES D'APPLICATION

- détergent pour les instruments et les surfaces
- renforce le pouvoir nettoyant des désinfectants cationiques

MODE D'APPLICATION/DOSAGE

Diluer avant l'utilisation!

Blanisol®-Pur est un concentré liquide, à partir duquel il est possible d'effectuer toute dilution souhaitée en ajoutant simplement de l'eau du robinet. Pour éviter toute formation de mousse, remplir le seau d'eau d'abord et ajouter **Blanisol®-Pur** ensuite.

- | | |
|---|----------------|
| • Nettoyage des instruments médicaux | 0,25 % – 1,0 % |
| • Nettoyage de surfaces résistant à l'eau | 0,25 % – 0,5 % |
| • Renforcement de l'action détergente des désinfectants cationiques | 0,25 % – 0,5 % |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / STOCKAGE

- Conserver hors de la portée des enfants!
- Porter des gants de protection lors de la manipulation du produit concentré!
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption!

PROPRIÉTÉS

Blanisol®-Pur est un détergent fortement concentré destiné à une élimination non-agressive des souillures organiques même importantes telles que le sang, l'albumine, les lipides.

La compatibilité chimique et microbiologique avec les désinfectants suivants: **Almyrol®**, **Lysoformin® spezial**, **Lysoformin® 3000** et **Lysoformin® rapid** est assurée.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS DE TRANSPORT

12 x 1000 ml (flacons)

Art.-Nr.

2113

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerion aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch