



INSTRUMENTEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL

Lysoform®-Desmat

Flüssiges Desinfektionsmittel zum Einsatz in
Spülmaschinen für den medizinischen Bereich
und Labor



CE0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoform®-Desmat

Konzentrat

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:

3,5 g Glutaral, 6,0 g Glyoxal

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten und Zubehör, thermolabilen Instrumenten, Kunststoff-Utensilien, OP-Schuhen, Baby-Flaschen und sonstigen Materialien.

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Programmwahl nach Angaben des Maschinenherstellers. Ein gesicherter Desinfektionseffekt ist nur dann gewährleistet, wenn bei einer Anwendungskonzentration von mindestens 10 ml/Liter bei 60 °C eine Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten gegeben ist. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers der zu desinfizierenden Objekte.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien, Pilze und Viren
- geeignet auch für eloxierte Geräte
- pH-neutral

BESONDERE HINWEISE

- a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch Sollte das Präparat Lysoform®-Desmat in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.
Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen: bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit Wasser spülen.
- b) Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

2 x 5-Liter-Kanister

Art.-Nr.

5395

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG

Postfach 444, CH-5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch