



FLÄCHEN-  
DESINFIZIATIONSMITTEL

# Aerodesin®

Gebrauchsfertige Desinfektion auf Alkoholbasis  
zur Schnell-Desinfektion von Medizinprodukten

Désinfectant prêt pour l'emploi à base d'alcool pour  
une désinfection rapide des dispositifs médicaux



CE0482

# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

## Aerodesin®

Gebrauchsfertig  
Zur gewerblichen Verwendung

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:  
32,5 g Propan-1-ol, 18,0 g Ethanol (vergällt)

## ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Schnelldesinfektion von

- kleinen Flächen und Gegenständen

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Unverdünnt anwenden!  
Aerodesin® aufbringen und mit trockenem Tuch verreiben.  
Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen  
(max. 50 ml/m<sup>2</sup> Raumgrundfläche).

### Wischdesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 mit Mechanik, hohe Belastung

bakterizid, levurozid	100 % – 60 s
-----------------------	--------------

### Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie

begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 2017	100 % – 30 s
---	--------------

### EURO-Normen (hohe Belastung)

EN 13624, Fungizidie	100 % – 5 min
----------------------	---------------

## WARN- UND LAGERHINWEISE

- Aerodesin® ist entzündlich
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich lagern.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

## EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und behüllte Viren
- schneller Wirkungseintritt und rasche Abtrocknung nach Desinfektion der Flächen und Gegenstände
- frischer Geruch
- gute Netzfähigkeit

## BESONDERE HINWEISE

- Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch  
Aerodesin® ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen. In jedem Fall ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Sonstiges: Kein Kontakt mit alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Acrylglas u.a.).
- Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1 -Liter-Flasche

Art.-Nr. 9896

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –  
Nous vous rappellerions aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0  
CH: 056 - 441 69 81

# Mode d'emploi

à lire attentivement!

## Aerodesin®

Prêt à l'emploi  
Pour usage professionnel

## COMPOSITION:

100 g de solution contiennent:  
32,5 g propan-1-ol, 18,0 g d'éthanol (dénaturé)

## DOMAINE D'UTILISATION:

Disinfection rapide pour:

- Petites surfaces et objets

## MODE D'UTILISATION

Utilisation non diluée seulement!  
Appliquer sur les surfaces avec un chiffon sec. Les surfaces et objets doivent être complètement humidifiés par le produit  
(max. 50 ml/m<sup>2</sup> aire de la pièce)

### Désinfection par essuyage conformément aux méthodes de la VAH de 2015, avec effet mécanique, contamination organique importante

bactéricide, levuricide, tuberculicide	100 % – 60 s
--	--------------

### Tests conformément aux directives de DVV/RKI

efficace vis-à-vis des virus enveloppés (VHB/VIH/VHC inclus) conf. aux recommandations du RKI de 2017	100 % – 30 s
---	--------------

### Normes européennes (contamination organique importante)

EN 13624, Fongicide	100 % – 5 min
---------------------	---------------

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Produit inflammable!
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ceci est un désinfectant! Conserver au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé loin de produits inflammables et hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

## PROPRIÉTÉS

- Lutte contre les bactéries (BK inclus), les champignons et les virus enveloppés
- Efficacité et séchage rapides après la désinfection des surfaces et des objets
- Odeur fraîche
- Bon effet mouillant

## RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte: Au cas où Aerodesin® viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement. Diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin dans tous les cas.
- Ne pas utiliser sur des surfaces craignant l'alcool (laques, vernis, Plexiglas)
- Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi avant l'utilisation.

Ce produit est certifié conforme et figure sur les listes appropriées.

## CONDITIONNEMENT

12 x 1000 ml

no d'article 9896



## Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269  
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

## LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG  
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14  
www.lysoform.ch