



FLÄCHEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL

Lysoform®

Desinfektion von Flächen, Inventar
und Medizinprodukten

Désinfection des surfaces, de l'équipement
et des dispositifs médicaux



CE0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoform®

Wirkstoff: Formaldehyd

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:
7,5 g Formaldehyd

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Abtötung von Mikroorganismen, die Krankheiten, Verderbnis, Fäulnis und/oder Gerüche erzeugen.

- Flächen-, Inventar- und Wäschedesinfektion
- Seuchenbekämpfung

GEGENANZEIGEN

Allergie gegen Formaldehyd

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Nur mit Wasser verdünnt anwenden!

Nach Entnahme der notwendigen Menge von Lysoform®-Konzentrat Behälter sofort wieder verschließen!

zur Seuchenbekämpfung gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz IfSG

Flächendesinfektion (Wirkungsbereich AB) 5 % – 6 h

Wäschedesinfektion (Wirkungsbereich AB) 4 % – 12 h

WICHTIG: Die Menge des Wassers errechnet sich, wenn von der gewünschten Menge der Gebrauchsverdünnung die Menge des Desinfektionsmittels abgezogen wird.

Lysoform · Hygiene mit System

Konzentration	0,25%	0,5%	1,0%
Dosiersystem (auf 8 Liter Wasser)			
Dosierpumpe (1 Hub = 20 ml)	1 Hub	2 Hübe	4 Hübe
Lysoform-Dosierhilfe	einmalige Einstellung auf die gewünschte Konzentration		

Im Seuchenfall gem. RKI-Liste (A, B)

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)

gem. RKI-Liste (A, B) 5,0 % – 6 Std.

Wäschedesinfektion (Einlegeverfahren)

gem. RKI-Liste (A, B) 4,0 % – 12 Std.

Dosierbeispiel:

1 Liter Wasser und 10 ml Lysoform® = 1 % Lösung.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Lysoform® kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Lüften nach Anwendung als Flächendesinfektionsmittel.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Lysoform® sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

EIGENSCHAFTEN

- Desinfektion und Reinigung hautpilzkontaminierter Fußböden und Gegenstände (Badematten und -roste, Schuhe, Strümpfe u. a.)
- Wäsche- und Textil-Desinfektion (inkl. Tbc), Desinfektion für Klinik, ärztliche Praxis und hygienische Sauberhaltung aller sanitären Einrichtungen, z. B. Toiletten und Baderäume
- biologisch abbaubar

Mode d'emploi

Lire attentivement avant l'utilisation!

Lysoform®

Principe actif: formaldéhyde

Réservé aux utilisateurs professionnels

COMPOSITION

100 g de solution contiennent:
7,5 g de formaldéhyde

DOMAINES D'APPLICATION

Destruction des micro-organismes qui sont la cause de maladie, putréfaction, pourriture et mauvaises odeurs

- désinfection des surfaces, de l'équipement et du linge
- désinfection en cas d'épidémies

CONTRE INDICATIONS

Allergie au formaldéhyde

MODE D'UTILISATION / DOSAGE

Utilisation externe et en dilutions aqueuses seulement! Reformer le flacon immédiatement après en avoir pris la quantité nécessaire.

pour le contrôle des maladies conformément au § 18 de la loi sur la protection contre les infections IfSG

Désinfection de surface (plage efficace AB) 5 % – 6 h

Désinfection du linge (plage efficace AB) 4 % – 12 h

IMPORTANT: La quantité d'eau est calculée en soustrayant la quantité de désinfectant de la quantité souhaitée de la dilution de travail.

Lysoform · L'Hygiène avec Système

concentration	0,25%	0,5%	1,0%
dosage (pour 8 l de l'eau)			
pompe doseuse (appuyer 1 fois = 20 ml)	1 fois	2 fois	4 fois
système de dosage de Lysoform	ajuster une seule fois pour obtenir la concentration souhaitée		

Désinfection par frottage en cas d'épidémie

conf. à la liste officielle du Robert-Koch-Institut allemand

(catég. A, B) 5,0 % – 6 heures

Désinfection du linge (processus d'insertion)

conf. à la liste officielle du Robert-Koch-Institut allemand

(catég. A, B) 4,0 % – 12 heures

Exemple de dosage:

1 litre d'eau et 10 ml de Lysoform® solution à 1%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- Conserver Lysoform® dans un endroit frais et sec, mais à l'abri du gel, bien ventilé et hors de la portée des enfants.
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux pendant la manipulation du produit concentré!
- Utiliser uniquement dans un local bien ventilé.
- Aérer après l'utilisation sur les surfaces.
- Ne plus utiliser une fois la date de péremption atteinte!
- Utiliser Lysoform® en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi.

PROPRIÉTÉS

- Désinfection et nettoyage des sols et objets contaminés par les levures responsables des mycoses des pieds (nattes, sorties de bain, chaussures, socquettes etc)
- Désinfection du linge et des textiles (BK inclus), désinfection de l'équipement clinique et du cabinet médical ; entretien hygiénique de toutes les installations sanitaires par ex. des toilettes et des salles de bains
- Biologiquement dégradable.

BESONDERE HINWEISE

- a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
Falls das konzentrierte Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z. B. Rachen, Magen etc.) oder konzentriertes oder verdünntes Präparat in die Augen gekommen ist, im Falle von Augen auch bei verdünntem Präparat, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Falls Lysoform® eingenommen worden ist: Zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen! Patienten nicht erbrechen lassen, da Verätzungen in der Speiseröhre entstehen können.
- b) Keine Waschmittel bzw. Haushaltsreiniger zumischen, weil dadurch die Wirkung beeinträchtigt werden könnte.
- c) **Lysoform®** sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

20 x 500 ml-Flasche
12 x 1 Liter-Flasche
2 x 5 Liter-Kanister

Art-Nr.

6545
6566
6444

Zubehör

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister (1 Hub = 20 ml)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- a) Contre-mesures en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant: Au cas où le concentré de Lysoform® viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), et au cas où le produit même dilué serait entré en contact avec les yeux, rincer immédiatement abondamment à l'eau potable et consulter un médecin. Si les vapeurs du produit concentré ont été inhalées, il se peut que les muqueuses soient irritées. Dans ce cas, aérer ou emmener le patient à l'air frais. Si le produit a été ingéré: Diluer sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient et consulter un médecin. Ne pas faire vomir le patient, car cela pourrait provoquer des brûlures dans l'œsophage.
- b) Ne pas ajouter de détergents ou de produits de nettoyage usuels à Lysoform®: Cela risquerait d'inhiber et d'éliminer son action désinfectante.
- c) Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette ou le prospectus avant l'utilisation

CONDITIONNEMENT

20 x 500 ml-flacon
12 x 1 litre-flacon
2 x 5 litres-bidon

no.: d'article

6545
6566
6444

Accessoires:

Pompe doseuse pour jerrican de 5 l (appuyer 1 fois = 20 ml)

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerion aussitôt!

D: 030 77992-0
CH: 056 4416981



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon +49 30 77992-0, Telefax +49 30 77992-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG

Dorfstr. 26a, CH-5210 Windisch
Telefon +41 56 4416981, Telefax +41 56 4424114
www.lysoform.ch