



FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL

Lysoformin® rapid wipes

Vorgetränkte Tücher für eine schnelle Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und patientennahen (Klein-) Flächen im humanmedizinischen Bereich



neue
Verpackung
weniger Plastik
= weniger
Müll!

CE0482



Lysoformin® rapid wipes



1. Etikett mit Öffnungsdatum und Namen beschriften



2. Schutzhandschuhe anziehen.



3. Deckel auspacken



4. Beutel seitlich auseinanderziehen



5. Beutelfolie innerhalb des Gewindes vorsichtig ohne Druck mit einem scharfen, spitzen Messer (Cuttermesser liegt dem Karton bei) ausschneiden und vorsichtig entfernen



6. Das erste Tuch durch die Öffnung des Entnahmerverschlusses ziehen und verwerfen. Darauf achten, dass schon der Anfang des zweiten Tuches durch die Öffnung gezogen ist.



7. Den Deckel des Entnahmerverschlusses schließen (man hört das Einrasten)



8. Deckel auf das Gewinde schrauben, bis es einrastet (man hört das Einrasten). Nach Tuchentnahme Deckel immer sofort fest verschließen.



LYSOFORM
Seit • Since • Depuis 1900

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de