



FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL

Lysoformin® rapid wipes

Vorgetränkte Tücher für die schnelle Wischdesinfektion
und Reinigung von Medizinprodukten und patientennahen
(Klein-) Flächen im humanmedizinischen Bereich.



neue
Verpackung
weniger Plastik
= weniger
Müll!

CE0482



Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoformin® rapid wipes

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher im weißen Standbeutel

100 Tücher enthalten:

1,5 l Tränklösung Lysoformin® rapid (1 %ig)

Wirkstoffe pro Tuch:

8,85 mg Didecyldimethylammoniumchloride

11,1 mg Bis-(3-aminopropyl)dodecylamine

EIGENSCHAFTEN

- 100 Tücher (30 x 30 cm) pro Rolle, 1 Tuch ausreichend für ca. 1 m² Fläche
- sparsam im Verbrauch, einzeln abreißbar
- saugfähiges und fusselfreies Vlies
- Standbeutel mit Tragegriff, einfacher Gebrauch und Transport
- EN 16615 (4-Felder-Test), Präparat VAH-gelistet

Flächen-Desinfektion und -Reinigung

Hospitalismus-Prophylaxe	5 min EZ
Wirkpektrum: begrenzt viruzid	10 min EZ

ANWENDUNGSBEREICH

Schnelle Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und patientennahen (Klein-) Flächen im humanmedizinischen Bereich.

Zur gewerblichen Verwendung

ANWENDUNG

Die zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und bis zum Ende der Einwirkzeit einwirken lassen!

Auf dem runden Etikett wird das Datum der ersten Öffnung vom Anwender vermerkt. Die getränkten Tücher sind nach Öffnung bis zu 28 Tage verwendbar.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Lysoformin® rapid wipes vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Lysoformin® rapid wipes aufrecht stehend im geschlossenen Originalbehälter, kühl, aber frostfrei und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhandschuhe tragen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

4 Standbeutel mit je 100er Tuchrolle

4 Entnahmeverchlüsse

1 Mini-Cuttermesser

Art.-Nr.

9235

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück

Tel.: 030 - 77 99 2-0



1. Etikett mit Öffnungsdatum und Namen beschriften



2. Schutzhandschuhe anziehen.



3. Deckel auspacken



4. Beutel seitlich auseinanderziehen



5. Beutelfolie innerhalb des Gewindes vorsichtig ohne Druck mit einem scharfen, spitzen Messer (Cuttermesser) liegend dem Karton bei) ausschneiden und vorsichtig entfernen



6. Das erste Tuch durch die Öffnung des Entnahmeverchlusses ziehen und verworfen. Darauf achten, dass schon der Anfang des zweiten Tuches durch die Öffnung gezogen ist..



7. Den Deckel des Entnahmeverchlusses schließen (man hört das Einrasten)



8. Deckel auf das Gewinde schrauben, bis es einrastet (man hört das Einrasten). Nach Tuchentnahme Deckel immer sofort fest verschließen.



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de