



FLÄCHEN-  
DESINFIZIATIONSMITTEL

# Lysoform®-soft-Vlies

## Flächenwischtücher

Universeller Vliestuchspender zum praktischen  
Anwenden wässriger oder alkoholischer  
Desinfektions- und Reinigungsmittel.



# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen

## Lysoform®-soft-Vlies

im quadratischen Spender-Eimer mit transparenter Optik

### EIGENSCHAFTEN

- ergiebig (100 Wischtücher im Format 300 x 300 mm)
- sparsam im Verbrauch, einzeln abreißbar
- reißfestes, saugfähiges und fusselfreies Vlies
- handlicher Spender-Eimer mit Tragegriff
- geeignet für alkoholische bzw. mit Wasser verdünnte Flächen-desinfektions- und/oder Reinigungsmittel

Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist ein vielseitig einsetzbarer Vliestuchspender zum Nachfüllen.

**Vorteile:** Die Einwegtücher vermindern die Arbeitsvorbereitungszeit. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelverbrauch.

Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist jederzeit und an jedem Ort einsatzbereit (Tuchrolle einzeln verpackt im transparenten Folienbeutel).

### AUFBAU UND MATERIAL

Das robuste Spendersystem (Polypropylen) besteht aus dem Lysoform®-soft-Vlies-Spender mit Tragegriff, der mit einer trockenen Vliesrolle aus einzelnen abreißbaren Lysoform®-soft-Vlies-Tüchern befüllt wird.

- Der Verschluss verhindert bei ordnungsgemäßem Verschließen das Austrocknen der Tücher.
- Lysoform®-soft-Vlies besteht aus saugfähigem, reißfestem, fusselfreiem 2-Komponenten-Material (PP/PE). Das aufgenommene Desinfektionsmittel wird leicht an die zu desinfizierende Fläche abgegeben. Auf die vollständige und ausreichende Benetzung der zu desinfizierenden Flächen ist zu achten!
- Jeder Lysoform®-soft-Vlies-Rolle ist ein vom Anwender zu beschriftendes Sicherheitsetikett beigelegt. Auf diesem Sicherheitsetikett werden der Produktname, die Charge, die Konzentration, die Einwirkzeit, das Datum des Ansetzens der Lösung, die Haltbarkeit der Lösung (die Standzeit, z. B. 28 Tage, ist abhängig vom eingesetzten Präparat) vermerkt.



1. Handschuhe anziehen. Deckel der Spenderbox öffnen.



2. Vliesrolle mit Folienbeutel in den Eimer einsetzen.



3. Folienbeutel öffnen und über den Eimer rand ziehen. Dann die Desinfektionslösung gem. Herstelleranweisung zugeben. Durchtränkung abwarten (mind. 30 Minuten).



4. Deckel öffnen und Vliestuch aus der Mitte durch die Öffnung des Deckels führen. Anschließend Eimer und Deckel sorgfältig verschließen.



5. Etikett beschriften und aufkleben.

## ANWENDUNG

**Wichtig:** Nur nasse Tücher, mit denen die zu behandelnden Flächen vollständig benetzt werden können, verwenden! Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist für den Einsatz mit Flächendesinfektionsmitteln aller Dosierungen geeignet. Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem wird mit mind. 1,0 Liter Desinfektionsmittellösung befüllt.

Bei der Verwendung von Desinfektionsmittel- oder Reinigungsmittel-Konzentraten ist die Gebrauchslösung mit kaltem Wasser frisch anzusetzen. Nach dem Befüllen mind. 30 Minuten warten, bevor das erste Tuch entnommen wird, damit alle Tücher vollständig getränkt sind.

Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise zum jeweiligen Produkt, die Vorschriften der Berufsgenossenschaft und die DGHM/VAH-Einsatzkonzentrationen zu beachten. Ebenso zu beachten sind die Produktinformationen und die Sicherheitsdatenblätter sowie evtl. Entsorgungsvorschriften der Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel-Hersteller!

Verschluss nach jeder Tuchentnahme schließen!

## WIEDERBEFÜLLUNG

1. Vlies- und Flüssigkeitsreste mit Folienbeutel entsorgen.
2. Deckel des Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystems vor jeder Neubefüllung gründlich mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch desinfizieren.
3. Neue Vliesrolle mit Folienbeutel einsetzen und ausreichend Anwendungslösung dazugeben. Deckel aufsetzen. Durchtränkung abwarten (mind. 30 Minuten).
4. Neues, korrekt beschriftetes Etikett anbringen.

## WARNHINWEIS

Das Lysoform®-soft-Vlies ist bestimmt für die Applikation von Desinfektions-, Reinigungslösungen und anderen Chemikalien. Sofern für die verwendete Gebrauchslösung Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen (siehe Produktinformation des Präparates) bei der Anwendung erforderlich sind, müssen vom Anwender alle dort empfohlenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit befolgt werden. Den befüllten Tücher-Spender nicht für langfristige Lagerung und Transport benutzen. Bei der Entsorgung von Behälter und Inhalt sind alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu befolgen.

**HINWEIS:** Das Lysoform®-soft-Vlies-Reinigungssystem ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

## BEFÜLLUNGSHINWEISE FÜR 1,0 LITER GEBRAUCHSLÖSUNG

### Dosierung:

0,25 % = 1,0 l Wasser und 2,5 ml Konzentrat zufügen  
 0,50 % = 1,0 l Wasser und 5,0 ml Konzentrat zufügen  
 0,75 % = 1,0 l Wasser und 7,5 ml Konzentrat zufügen  
 1,00 % = 1,0 l Wasser und 10,0 ml Konzentrat zufügen  
 1,50 % = 1,0 l Wasser und 15,0 ml Konzentrat zufügen

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

6 Spender-Eimer	Art-Nr. 3400
6 Trockenrollen à 100 Tücher	3402

## ZUBEHÖR

Deckel mit grüner Entnahmeöffnung	3403
Entnahmeöffnung (rot)	3404

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!  
Wir rufen sofort zurück.

**Tel: 030 - 77 99 2-0**



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin  
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269  
[www.lysoform.de](http://www.lysoform.de), e-mail: [kontakt@lysoform.de](mailto:kontakt@lysoform.de)

**LYSOFORM**

**Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG**

Dorfstr. 26a, CH-5210 Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14  
[www.lysoform.ch](http://www.lysoform.ch)