



HÄNDE-/HAUT-  
DESINFIZIATIONSMITTEL

viruzid und  
hautverträglich

## Neoseptin®

Alkoholisches Hände-Desinfektionsmittel,  
Kleinflächendesinfektion auch für Medizinprodukte

Désinfectant alcoolisé pour les mains, les  
petites surfaces et les dispositifs médicaux



CE0482

# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

## Neoseptin®

Gebrauchsfertig.

Zur gewerblichen Verwendung.

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 79,9 g Ethanol 96 %

## ANWENDUNGSGEBIET

- Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. Tbc), Pilzen und Viren
- Desinfektion von Händen sowie von Kleinflächen und Medizinprodukten

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Äußerlich, unverdünnt anwenden! Desinfektion von Kleinflächen und Medizinprodukten: Neoseptin® aufbringen und mit trockenem Tuch verreiben. Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m<sup>2</sup>).

Händedesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 niedrige und hohe Belastung	
bakterizid, levurozid	30 s
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie	
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 3/2017	30 s
EURO-Normen (geringe Belastung)	
begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476 (Adenovirus und MNV)	30 s
viruzid gemäß EN 14476	30 s
EURO-Normen hygienische & chirurgische Händedesinfektion	
EN 1500	30 s
EN 12791	90 s
Wischdesinfektion gem. VAH-Verfahren 2001/2002 mit Mechanik, niedrige und hohe Belastung	
bakterizid, levurozid	1 min

## WARN- UND LAGERHINWEISE

- Nicht in offenen Wunden und auf Schleimhäuten anwenden!
- Neoseptin® ist leicht entzündlich.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Medizinprodukt kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden!

## EIGENSCHAFTEN

- unparfümiert
- umfassendes Wirkungsspektrum
- zuverlässige Wirkung in Gegenwart von Eiweiß, Serum und Blut
- gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung (rückfettend und rückfeuchtend)
- angenehmes Hautgefühl

# Mode d'emploi

à lire attentivement!

## Neoseptin®

Prêt à l'emploi.

Pour usage professionnel.

## COMPOSITION

100 g de solution contiennent: 79,9 g d' éthanol 96%

## DOMAINES D'APPLICATION

- contrôle des bactéries (BK inclus), des champignons et des virus
- désinfection des mains, de petites surfaces et de dispositifs médicaux

## MODE D'APPLICATION/DOSAGE

Utilisation externe et sous forme concentrée seulement! Désinfection des petites surfaces et des dispositifs médicaux. Appliquer Neoseptin® sur les objets/surfaces et frotter légèrement avec un chiffon. Surfaces et objets doivent être complètement mouillés par le désinfectant (max. 50 ml/m<sup>2</sup>).

Désinfection des mains conformément aux VAH 2015, contamination organique faible et importante	
bactéricide, levurocide	30 s
Tests conformément aux directives de DVV/RKI	
efficace vis-à-vis des virus enveloppés (VHB/VIH/VHC inclus) conf. aux recommandations du RKI de 3/2017	30 s
Normes européennes (contamination organique faible)	
virucide PLUS conformément à EN 14476 (plus adéno virus et MNV)	30 s
virucide conformément à EN 14476	30 s
Normes européennes: Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains	
EN 1500	30 s
EN 12791	90 s
Désinfection par essuyage conformément aux VAH 2001/2002, avec effet mécanique, contamination organique faible et importante	
bactéricide, levurocide	1 min

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes et les muqueuses!
- Neoseptin® est facilement inflammable!
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Dispositif médical! Conserver ou frais, au sec, à l'abri du gel, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption!

## PROPRIÉTÉS

- Non-parfumé
- spectre d'efficacité complet
- efficacité sûre, même en présence d'albumine, de sérum et de sang
- bien supporté par la peau, même en cas d'utilisation fréquente (surgraissant et réhydratant)
- sensation agréable sur la peau

**BESONDERE HINWEISE**

Neoseptin® ist ein Medizinprodukt der Klasse II A: CE 0482.  
Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets  
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

**VERSANDEINHEIT/PACKUNG**

12 x 500-ml-Flasche  
6 x 1-Liter-Flasche  
15 ml SaniStick mit Sprühkopf

**Art.-Nr.**

2700  
2705  
2708

**OBSERVATIONS PARTICULIÈRES**

Utilisez les dispositifs médicaux en toute sécurité!  
Lisez le prospectus et l'étiquette avant l'utilisation.

Ce produit est certifié conforme et figure sur les listes appropriées.

**CONDITIONNEMENT/UNITÉS DE TRANSPORT**

12 x 500 ml flacon  
6 x 1 litre flacon  
15 ml SaniStick avec vaporisateur

**No d'article**

2700  
2705  
2708

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –  
Nous vous rappellerion aussitôt!

**D:** 030 - 77 99 2-0  
**CH:** 056 - 441 69 81



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin  
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269  
[www.lysoform.de](http://www.lysoform.de), e-mail: [kontakt@lysoform.de](mailto:kontakt@lysoform.de)

**LYSOFORM**

**Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG**

Postfach 444, CH-5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14  
[www.lysoform.ch](http://www.lysoform.ch)